

Monteringsanvisning Hoftebelte

Mounting Description Hip belt

NORSK

Trekk beltet gjennom hoftebeltefestet som ligger vedlagt (Bilde 1).

Tre beltet tilbake gjennom belteklemmen (Bilde 2).

Fest hoftebeltet i det bakerste hullet i rygghengse-braketten med den vedlagte skrue og mutter (Bilde 3). Bruk to 13mm fastnøkler.

Hoftebeltebraketten bør stå i 45 graders vinkel (Bilde 4).



ENGLISH

Pull the belt through the hole in the hip belt bracket (Picture 1).

Thread the belt back through the enclosed belt clamp (Picture 2).

Fix the hip belt bracket in the bacmost hole of the backrest hinge using the enclosed screws and nuts (Picture 3). Use two 13mm open-end spanners.

The hip belt bracket should be mounted in a 45 degrees angle.