

## Bedienungsanleitung Einstellung der Gasdruckzylinder für Sitzkantelung und Rückenverstellung beim Netti III


### Einleitung:

Die Gaszylinder sind bei Verlassen des Werkes optimal eingestellt und geölt. Die Gaszylinder sind geprüft und für einen Einsatz bis 60.000 Bewegungen getestet.

Es ist selbstverständlich, dass alle beweglichen Teile, die permanent in Gebrauch sind, einer Reinigung und Wartung unterzogen werden müssen.

### Wartung nach Reinigung des Netti III:

Durch eine Reinigung des Rollstuhls kann das Schmieröl auf der Kolbenstange entfernt worden sein. In diesem Falle bringen Sie bitte neues Schmierfett auf den Auslösehebel ( Release Lever ) der Kolbenstange auf. Beachten Sie die Zeichnung unten:

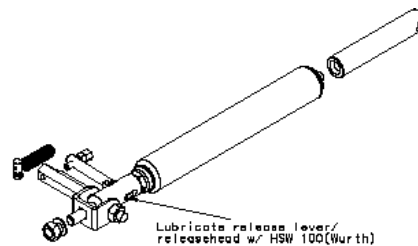


Wenn der Zylinder sich nicht mehr bewegen lässt:

**Bitte überprüfen Sie bitte Folgendes:**

1. Stellen Sie die Justierschraube am Handhebel ein. Hiermit justieren Sie den Bowdenzug der Gasdruckzylinder.



- 2a. Drehen Sie die kleine Schraube zum Handhebel hin oder vom Handhebel weg.
- 2b. Durch drehen der größeren Schraube fixieren Sie die gewünschte Position. Justieren Sie Stück für Stück und Testen Sie, wenn jemand im Stuhl sitzt.

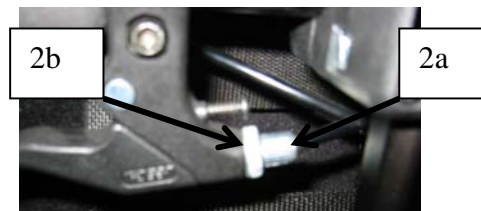

3. Wenn der Bowdenzug zu stramm eingestellt ist, dann schließt der Gaszylinder nicht und kann bewegt werden ohne den Auslösehebel zu betätigen. In diesem Falle stellen Sie die Justierschrauben so ein, dass der Bowdenzug weniger straff ist der Gaszylinder sich nur bewegt, wenn der Auslösehebel bewegt wird.

**Wenn diese Einstellung den Gazyylinder nicht in Bewegung setzt, dann empfehlen wir eine Grundeinstellung des Gaszylinders vorzunehmen.**

**Diese Einstellung machen Sie bitte ohne dass jemand im Stuhl sitzt!!!!**

1. Drücken Sie den Zylinder zusammen. (so kurz als möglich).  
Bedeutet für den Rückenzyylinder: Ziehen Sie den Rücken bei betätigtem Handhebel fest zu sich heran.  
Bedeutet für den Gszyylinder der Sitzkantelung: Kanteln Sie den Stuhl nach hinten.  
Lösen Sie den Zylinder > siehe Text am Bild:

**Rückenzyylinder**

**Sitzkantelungszyylinder**


Ziehen Sie hier gezeigten den Fixierstift seitlich raus und klappen Sie den Rücken nach vorne.



Lösen Sie die hier gezeigte große Schraube.



2. Lösen Sie die hier mit dem Pfeil gekennzeichnete Mutter.

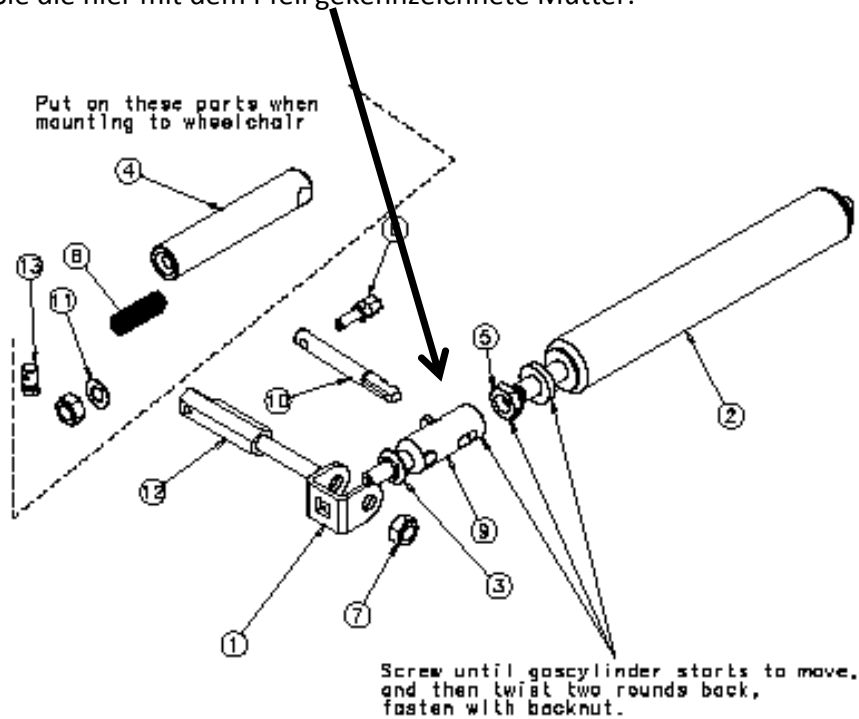

3. Drehen Sie den Zylinder, bis er beginnt sich zu bewegen, dann drehen Sie den Zylinder 2 Umdrehungen zurück und ziehen die Mutter wieder an.
4. Montieren Sie den Zylinder wieder am Stuhl und testen Sie mit einer Person im Stuhl, ob die gewünschte Wirkung eintritt.

**Wenn der Zylinder sich nicht bewegen lässt, liegt ein irreparabler Defekt vor und der Zylinder muss getauscht werden.**