

Montageanleitung für die Seitenpelotte Correction an anpassbare Rücken mit Velcro

Seitenpelotte Correction Links Artikelnummer 27374

Seitenpelotte Correction Rechts Artikelnummer 27375



Werkzeuge: 5 mm Inbusschlüssel

Allgemein:

Um den Adapter zu montieren, ziehen Sie die Schiebegriffe nach oben aus den Halterungen. Platzieren Sie den Adapter in der benötigten Höhe auf die Rückenlehnenrohre. Die Inbusschrauben werden auf der Innenseite der Rückenrohre angesetzt. Fixieren Sie den Adapter. Ziehen Sie die Schrauben fest an.

SENSE

Lösen Sie die Gurte der Rückenbespannung und platzieren Sie den Adapter auf dem Rückenrohr. Verfahren Sie weiter wie unter Punkt Allgemein beschrieben. Ziehen Sie nach der Montage des Adapters die Spanngurte wieder fest an.

NETTI-MODELLE:

Lösen Sie die Gurte der Rückenbespannung und schieben Sie den Adapter in der benötigten Höhe über das Rückenrohr. Es ist nicht notwendig das Velcromaterial auszuschneiden. Verfahren Sie weiter unter Punkt Allgemein beschrieben. Ziehen Sie nach der Montage des Adapters die Spanngurte wieder fest an.




Achtung:


Wenn Sie die Seitenpelotten Correction für die NETTI-MODELLE verwenden möchten, empfehlen wir, das FLIP-Rückenlehnenkissen zu verwenden.

Einstellung der Pelotte :


Am Adapter ist ein Kipp-Klemmhebel eingeschraubt. Nutzen Sie diesen zur Breitereinstellung der Pelotte. Zum Abnehmen der Pelotte lösen Sie den Kipp-Klemmhebel und ziehen Sie die Pelotte nach außen. Verdrehen Sie den Kipp-Klemmhebel nach Innen, damit dieser nicht mit dem Schiebegriff kollidiert.

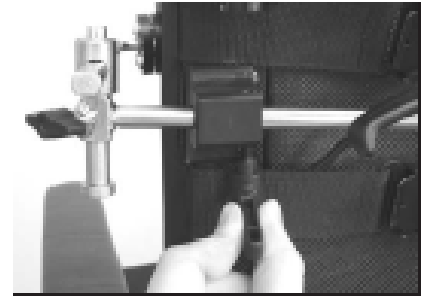

Um die Pelottentiefe einzustellen, lösen Sie die nach oben zeigende Inbusschraube am Drehadapter und stellen Sie die Tiefe ein. Danach ziehen Sie die Schraube wieder fest an.

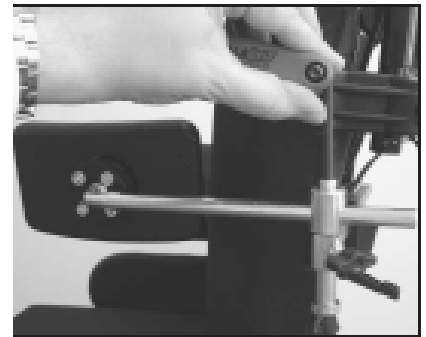

Um den Winkel des Pelottenpolsters einzustellen, lösen Sie die 4 Schrauben an der Außenseite der Pelotte und stellen Sie den benötigten Winkel ein. Danach alle 4 Schrauben wieder fest anziehen.

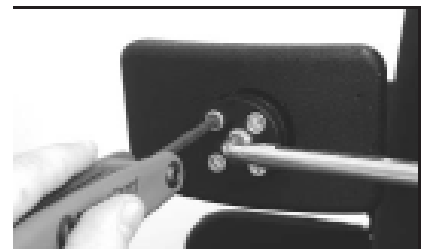

Die Seitenpelotte kann nach außen abgeschwenkt werden. Hierfür lösen Sie die schwarze Feststellschraube und ziehen den nach vorne zeigenden Pelottenarm nach oben, dann die Pelotte nach außen schwenken. Nach dem Einschwenken der Pelotte die Feststellschraube wieder fest anziehen.

