

## Montageanleitung Rückenlehnenverlängerung

**Lösen Sie die Schrauben, wie auf Bild 1 gezeigt, und entfernen Sie die Vierkantmutter innerhalb der Rückenlehnen-Rohre.**

**Bild 2 zeigt die Rückenlehnenverlängerung mit der integrierten Vierkantmutter.**

**Führen Sie die Rückenlehnenverlängerung in die Rückenlehne ein und stecken Sie die Schraube durch das Rückenlehnenrohr.**

**Drehen Sie die Schraube in das Gewinde der Rückenlehnenverlängerung und ziehen Sie die Schraube fest an, wie auf Bild 3 gezeigt.**

**Stecken Sie das Velcro der Rückenlehnenverlängerung über die Rückenrohre parallel zum Velcro der Rückenlehne.**

**Lösen Sie die beiden Teile des Velcro voneinander und stellen Sie den gleichen Durchhang ein wie beim Rückenlehnen - Velcro.**

**Schneiden Sie die Enden des Velcro entlang der Naht in der benötigten Breite ab, so daß das Klettmaterial ineinander greift.**




1



2



3

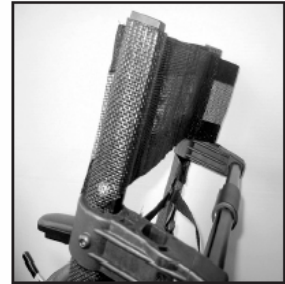

4