


Montageanleitung Feste Rückeneinheit Aluminium

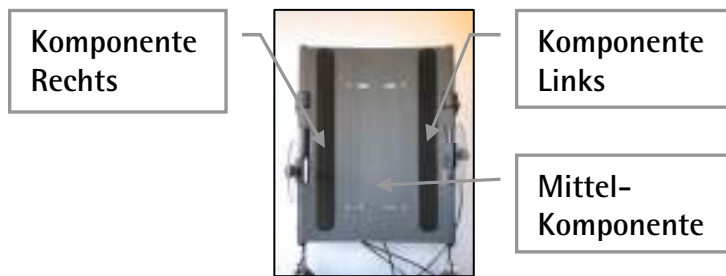

1. Entfernen des anpassbaren Rückens (Velcro)
 - lösen Sie die anpassbare Rückenbespannung indem Sie die Reißverschlüsse nach oben aufziehen
 - entfernen Sie die 2 Kreuz-Schlitzschrauben am Rückenrohr hinten/oben
2. Lösen Sie zuerst die beiden Schrauben beidseits innen am Rückenrohr unten und ersetzen Sie diese durch die beiliegenden M6 X 30 Innensechskant - Schrauben.



Schrauben entfernen



M6 X 30 Schrauben

3. Platzieren Sie Komponente Links am Rückenrohr und fixieren Sie diese mit den Muttern M6 und einer Unterlegscheibe am Rückenrohr unten.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit der Komponente Rechts.



5. Bohren Sie in Höhe des oberen Winkels ein 3mm Loch in das Rückenrohr / Rückenverlängerung und fixieren Sie die Komponenten Links / Rechts mit den selbstschneidenden Metallschrauben.



6. Platzieren Sie die Mittelkomponente mittig hinter die seitlichen Komponenten. Fixieren Sie die Mittelkomponente mit den 4 Schrauben und Muttern M4. Legen Sie Unterlegscheiben unter.



7. Befestigen Sie zuletzt die Bowdenzüge am Rückenrohr mit den Kabelbindern.



ALU REHAB
Thinking ahead - moving forward