



1. Entfernen Sie aus den Rückenrohren die Schrauben zur Fixierung der Schiebegriffhalter

Achtung, die innenliegende Mutter mit einer Zange vor dem Herunterfallen sichern
Achtung! Wenn Sie eine Rückenhöhe 60 cm verwenden, dann tauschen Sie die Schrauben gegen längere (M6 X 25 mm) aus.



2. Entfernen Sie die 4 Schrauben des Kopfstützenadapters



3. Setzen Sie nun den Kopfstützenstabilisator auf die Schiebegriffhalter und positionieren Sie die 4 Bohr-
löcher in Höhe der Einlässe des Kopfstützenadapters.



4. Befestigen Sie den Kopfstützenstabilisator wieder mit den Schrauben an den Schiebegriffhaltern.

Achtung, erst einmal nicht zu fest anziehen

Achtung! Bei Rückenhöhe 60 cm verwenden Sie bitte Schrauben mit Maß 6 X 25 mm, da die Rückenverlängerungsprofile nach innen zusätzlich auftragen.



5. Nun setzen Sie die 4 beiliegenden 50mm langen Inbusschrauben in die Bohrlöcher und fixieren den Kopfstützenstabilisator am Kopfstützenadapter.



6. Kontrollieren Sie den festen Sitz aller von Ihnen gelösten Schrauben.