

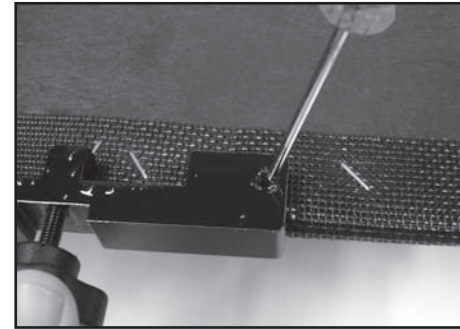


Montageanleitung Bein-Abduktionskeil

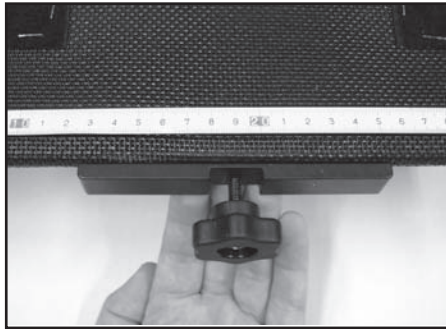

Werkzeuge: Ahle, 6mm Bohrer & 4mm Inbusschlüssel

1. Platzieren Sie die Halterung für den Bein-Abduktionskeil in der Mitte der Sitzplatte.
2. Markieren Sie mit einer Ahle die Position der zu bohrenden Löcher.
3. Bohren Sie 2 Löcher in die Sitzplatte und montieren Sie die Halterung an der Unterseite der Sitzplatte.
Setzen Sie die Schrauben von oben in die Löcher ein und fixieren Sie diese mit dem 4mm Inbusschlüssel.
4. Montieren Sie den Bein-Abduktionskeil auf die Halterung, indem Sie das Rohr zur Höhenverstellung auf den Halter aufsetzen.
Fixieren Sie den Bein-Abduktionskeil durch festziehen der Feststell-Sternschraube.
5. Der Bein-Abduktionskeil kann 8 cm in der Höhe (5B) und 10 cm in der Tiefe (5A) verstellt werden.

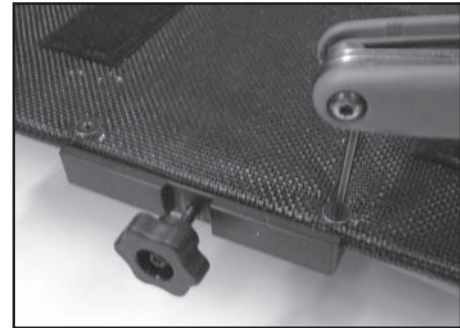

Artikelnummer	Artikel
27490	Bein-Abduktionskeil Klein 80mm
27491	Bein-Abduktionskeil Mittel 110mm
27492	Bein-Abduktionskeil Groß 140mm

