


## Montage des roten Bedienrades an der Universalbeinstütze

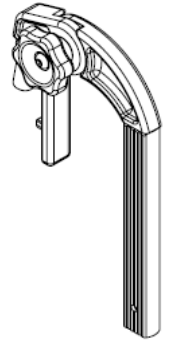

Sie erhalten das rote Bedienrad mit einer neuen Innensechskant-Schraube.

Lösen Sie zuerst die an der Universalbeinstütze vorhandene Schraube. Da die Schraube mit einem Loctite-Kleber in der Mutter fixiert wurde, ist es ratsam einen Heißluftfön anzuwenden, um die Schraube zu lösen.

Nehmen Sie nun das neue Bedienrad ( 6 ) und schrauben Sie die beigelegte Innensechskant-Schraube ( 7 ) in das Gewinde des Bedienrades.

Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an.

Nun setzen Sie alle Teile wie in Abbildung 1 gezeigt ineinander.

Bitte achten Sie darauf, dass sich das Bedienrad leicht lösen lässt.

### Achtung:

Schrauben Sie die Schraube ( 7 ) nur bis zur Bündigkeit in die Mutter ( 5 ) und fixieren Sie die Schraube mit Loctite 270

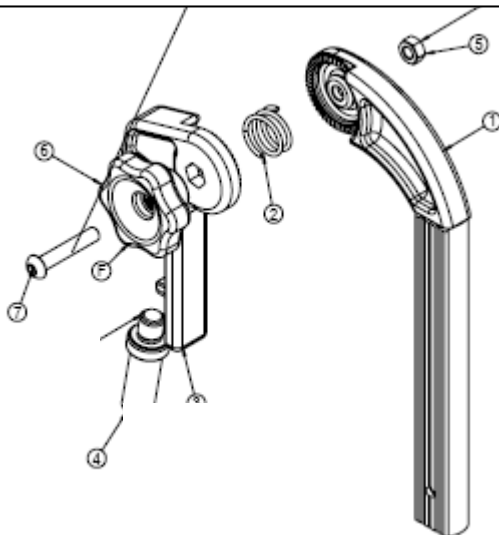


Abbildung 1